



Ръководство за поддръжка на Вашата аспирационна система с Orotol® plus & MD 555 cleaner



Ежедневна дезинфекция с Orotol® plus

С течния концентрат Orotol® plus имате идеалното решение за едновременно дезинфекциране, дезодориране, почистване и поддръжка на всички аспирационни системи и сепаратори за амалгама. Прилагането се извършва след края на лечението, при по-голямо натоварване 2 x дневно (на обед и вечер).

Дезинфекция
Дезинфекция

1 Предварително почистване




Аспирирайте 2 литра вода

2 Дозировка 2 %



Използване на 2 %-тен разтвор: 1 литър вода + 20 ml Orotol plus

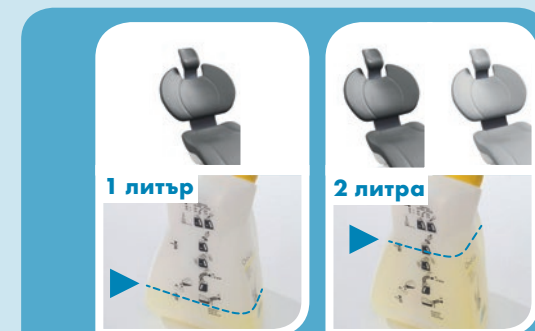

На зъболекарски стол:

1 литър вода + 1 капачка Orotol® plus (20 ml)

При 2 зъболекарски стола:

2 литра вода + 2 капачки Orotol® plus (40 ml)

3 Аспириране



Поставете смукателните маркучи, аспирирайте 1 литър разтвор на зъболекарски стол

4 Дезинфекция на плювалник



Най-малко 250 ml разтвор на плювалник

5 Време за действие



Да действа най-малко 1 час. Спектр на действие: бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно, ограничено вируцидно (HIV, HBV, HCV, норовируси)

6 Измиване на зъболекарския стол



При повторно пускане в експлоатация аспирирайте 2 литра вода


DÜRR
DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

Седмично почистване с MD555 cleaner

MD 555 cleaner е Вашият специален почистващ препарат за аспиратори и сепаратори за амалгама. Той има силно почистващо действие срещу отлагания, образуване на накипи и утайки. Използва се 1 до 2 x седмично (напр. вторник и четвъртък), при по-високо натоварване ежедневно през обедната почивка.

Почистващ
препарат
Cleaner

1 Предварително почистване

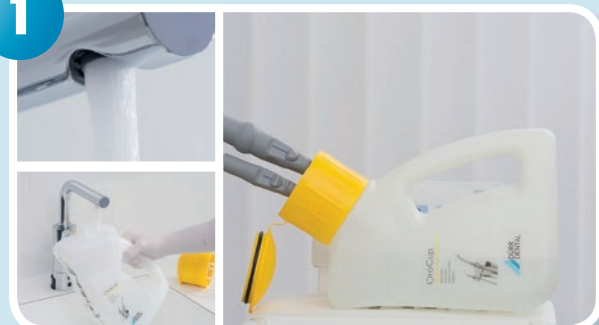


Аспирирайте 2 литра вода

2 Дозировка 5 %



Използване на 5 %-тен разтвор: 1 литър вода + 50 ml MD 555 cleaner

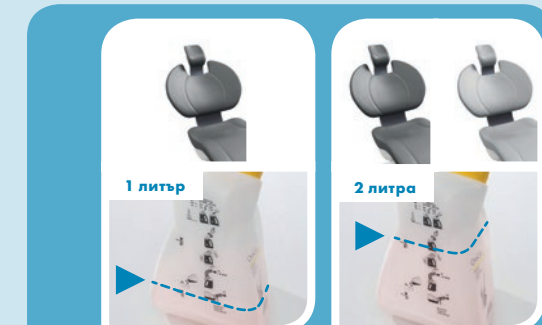

На зъболекарски стол:

1 литър вода + 2,5 капачки MD 555 cleaner (50 ml)

При 2 зъболекарски стола:

2 литра вода + 5 капачки MD 555 cleaner (100 ml)

3 Аспириране




Поставете смукателните маркучи и аспирирайте 2 литра или 1 литър разтвор

4 Почистване на плювалника



Най-малко 250 ml разтвор на плювалник

5 Време за действие

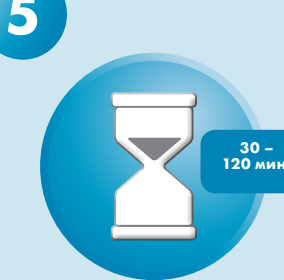

Да действа 30 до 120 минути

6 Измиване на зъболекарския стол



При повторно пускане в експлоатация аспирирайте 2 литра вода

DÜRR
DENTAL
THE BEST, BY DESIGN